

Nollställningsförfarande för elstativ

- Dra ur en av motorkablarna i styrenheten (strömkabeln skall vara ansluten) och sätt i den igen.
- Sänk bordet till bottenläge och håll inne knappen i ca 10 sek tills det klickar till.
- Släpp knappen och tryck en gång till på nedknappen i ca 10 sek tills det klickar till igen eller att bordet sänks ca 1 cm.
- Nollställningen är klar. Testa nu om bordet fungerar upp- och ned.

Kundservice
AB Edsbyverken

+46 271 275 48
+46 271 275 49